



**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774

Sklep internetowy

ECologiczny.pl

www.ecologiczny.pl

(+48) 735 707 000

ecologicznypl@gmail.com

Dane aktualne na dzień: 22-05-2026 19:32

Link do produktu: <https://www.ecologiczny.pl/merula-kubek-do-dezynfekcji-kubeczkow-menstruacyjnych-w-mikrofalowce-p-7036.html>



## MERULA Kubek do dezynfekcji kubeczków menstruacyjnych w mikrofalówce

Cena	<b>108,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>3470</b>

### Opis produktu

Merula Cupscup - kubek na twój kubeczek menstruacyjny. Dzięki kubkowi Merula możesz teraz szybko, łatwo i skutecznie wyczyścić kubeczek menstruacyjny bezpośrednio w kuchence mikrofalowej - zarówno po miesiączce, jak i pomiędzy nimi. Bardzo szybko niewielka ilość wody w kubku Merula zaczyna wrzeć, powodując, że bardzo gorąca para unosi się i dezynfekuje kubeczek. Wygodny uchwyt ułatwia wyjmowanie pojemnika Merula z kuchenki mikrofalowej. Po ostygnięciu kubeczka menstruacyjnego można go natychmiast użyć ponownie lub przechowywać w małej, oddychającej, bawełnianej torbie do następnego okresu.

### Sposób użycia:

Napełnij kubek czystą wodą do linii znakowania. W razie potrzeby dodaj odrobinę octu, aby zapobiec tworzeniu się osadów kamienia na kubeczku i pojemniku do dezynfekcji. Umieść umyty kubeczek menstruacyjny na niebieskiej podstawie z otworem skierowanym w dół. Zamknij pokrywę i otwórz zawór pary. Podgrzewaj całość w kuchence mikrofalowej o mocy 750 watów przez 5 minut. Jeśli moc jest inna, odpowiednio dostosuj czas nagrzewania. Upewnij się, że woda w misce Merula Cupscup nie wyparowała całkowicie. Uważaj, żeby się nie poparzyć - po procesie podgrzewania kubek Merula Cupscup i jego zawartość są bardzo gorące, a gorąca woda lub para mogą wydostawać się z kubka.

### Wymiary, pojemność:

Wysokość:

127 mm

Górna średnica:

69 mm

Dolna średnica:

53 mm

Szerokość z uchwytem:

90 mm

**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774

Sklep internetowy

ECologiczny.pl

www.ecologiczny.pl

(+48) 735 707 000

ecologicznypl@gmail.com

---

Waga:

66 g

Wymagana ilość wody:

około. 60 ml

Materiał:

Bez PP, BPA

**Przechowywanie:**

Przechowywać Merula Cupscup w suchym miejscu z otwartą pokrywką.

**Materiał:**

Merula Cupscup został przetestowany zgodnie z niemieckimi normami i spełnia wymagania rozporządzenia (WE) 1935 2004, rozporządzenia (WE) 10/2011 i LFGB. Kubek Merula można myć w zmywarce.