



**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774

Sklep internetowy

ECologiczny.pl

www.ecologiczny.pl

(+48) 735 707 000

ecologicznypl@gmail.com

Dane aktualne na dzień: 10-04-2026 10:30

Link do produktu: <https://www.ecologiczny.pl/organicup-kubeczek-menstruacyjny-rozmiar-a-p-7313.html>

# OrganiCup Kubeczek menstruacyjny Rozmiar A



Cena **134,28 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **1323**

## Opis produktu

Jedyny Kubeczek Menstruacyjny certyfikowany przez AllergyCertified!! Dlaczego to jest takie ważne? Mamy pewność, iż silikon medyczny, z którego jest wykonany kubeczek jest całkowicie bezpieczny, a także nie jest barwiony szkodliwymi i alergizującymi barwnikami! Pamiętajmy, że kubeczek menstruacyjny jest w naszym ciele do 12 godzin i zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort. Musimy być pewne, że to co jest tak blisko z naszym ciałem jest dla nas CAŁKOWICIE BEZPIECZNE!

OrganiCup – Kubeczek menstruacyjny Rozmiar A

Rozmiar A jest zalecany dla kobiet, które jeszcze nie rodziły, bądź rodziły poprzez cięcie (nie rodziły w sposób naturalny).

OrganiCup ma na celu zmienić wpływ miesiączki na nasze: życie, ciało i środowisko. Kubki menstruacyjne są alternatywą dla konwencjonalnych produktów menstruacyjnych.

Spełniają wszystkie odpowiednie wymogi dla twojego zdrowia, dla wygody i dla środowiska.

### 3 główne powody, dla których warto przejść na OrganiCup:

#### 1. Menstruacja wolna od chemii!

OrganiCup jest wykonany jedynie z silikonu medycznego. Nie zawiera: wybielaczy, barwników, środków zapachowych. W 100% wolny od substancji chemicznych. Oprócz tego kubeczek zbiera krew zamiast ją wchłaniać, co daje nam pewność braku szkodliwego wpływu na nasze ciało. OrganiCup jest certyfikowany przez AllergyCertified™, zarejestrowany w The Vegan Society (bez testów na zwierzętach) i spełnia wszystkie odpowiednie przepisy.

#### 2. 12 godzin wolności

OrganiCup zapewnia 12 godzin ochrony, dzięki czemu nie musisz myśleć o swojej menstruacji w ciągu dnia lub w nocy. Wystarczy tylko opróżnić swój kubeczek rano i wieczorem (w zależności od tego, jak intensywna jest twoja menstruacja). Oznacza to, że możesz biegać, pływać i spać - bez obaw.

#### 3. Oszczędzaj pieniądze i szanuj naszą planetę

OrganiCup jest wielokrotnego użytku, co oznacza, że każdego miesiąca ratujesz środowisko od dużej ilości odpadów.



**Symbolics Domains Ltd**

Company Number: 11189774

Sklep internetowy

ECologiczny.pl

www.ecologiczny.pl

(+48) 735 707 000

ecologicznypl@gmail.com

---

Jeśli to nie wystarczający powód, to możemy dodać, że dzięki OrganiCup nie musisz co miesiąc kupować produktów menstruacyjnych, co da odczuwalny efekt w postaci grubości Twojego portfela :)

## Wymiary kubeczka menstruacyjnego OrganiCup A

- średnica 40 mm,
- długość: około 5 cm bez łodyżki,
- pojemność: 25 ml.

OrganiCup to WOLNA OD CHEMII alternatywa, która zapewnia do 12 godzin ochrony (w dzień i w nocy). Zmiana może być pewnym wyzwaniem. Jednak czy pamiętasz jak to było kiedy po raz pierwszy aplikowałeś tampon lub próbowałeś soczewek kontaktowych? Każdy początek może być trudny - to samo dotyczy wypróbowania kubeczka menstruacyjnego po raz pierwszy. W zależności od Ciebie możesz od razu lub po kilku dniach, menstruacjach przyzwyczaić się do kubeczka. Jednak kiedy już doświadczysz wygodę jak oferuje produkt OrganiCup dojdiesz do wniosku, że być to trafiony zakup. Odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania znajdziesz w następujących podpunktach.

### Jak zaaplikować OrganiCup?

Przed pierwszym użyciem OrganiCup należy wysterylizować kubeczek we wrzącej wodzie przez 3-5 minuty. Na początku pamiętaj o umyciu rąk mydłem. Złóż kubeczek. Istnieją różne metody składania - możesz wypróbować równie i wybrać taką, która odpowiada najbardziej. Włóż złożony kubeczek i pozwól mu rozwinąć się wewnątrz pochwy. Po aplikacji kubeczek się rozłoży przy charakterystycznym dźwięku ssania lub dźwięku 'pop' co oznacza, że został odpowiednio umieszczony. W razie wątpliwości należy poczuć dno kubka - po włożeniu powinno ono być okrągłe lub owalne. Jeśli poczujesz wgniecenia lub zgniecenia na kubeczku, oznacza to, że się nie rozłożył. Delikatnie przytrzymaj podstawę kubka (nie trzpień) i spróbuj go obrócić, aby zapewnić utworzenie uszczelki ssania. Kiedy będzie na miejscu, postaraj się nieco pociągnąć za trzpień, jeśli poczujesz opór, ssanie zostało stworzone i kubeczek został pomyślnie umieszczony!

### Usuwanie OrganiCup

Pamiętaj, aby ponownie umyć ręce. Znajdź pozycję, w której zrelaksujesz się. Pociągnij delikatnie za nóżkę/trzpień i użyj mięśni brzucha, aby popchnąć kubeczek w dół, aż dojdiesz do dna kubka. Delikatnie uszczypnij dno, aby uwolnić zasysanie i uwolnij OrganiCup, przesuwając go na boki.

Opróżnij kubek wylewając zawartość do toalety, opłucz kubek wodą (pamiętaj o otworach wentylacyjnych) i zaaplikuj go ponownie. Po zakończeniu okresu przegotuj kubeczek we wrzącej wodzie przez 3-5 minut i włóż do bawełnianej torebki OrganiCup.

### Jak czyścić OrganiCup w publicznej łazience?

Możesz używać OrganiCup do 12 godzin, więc zazwyczaj będziesz musiała opróżnić go rano i wieczorem, ale jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz go opróżnić i nie masz dostępu do wody, możesz użyć OrganiWipe z OrganiCup, zabrać ze sobą butelkę wody lub po prostu użyć papieru toaletowego do czyszczenia.